


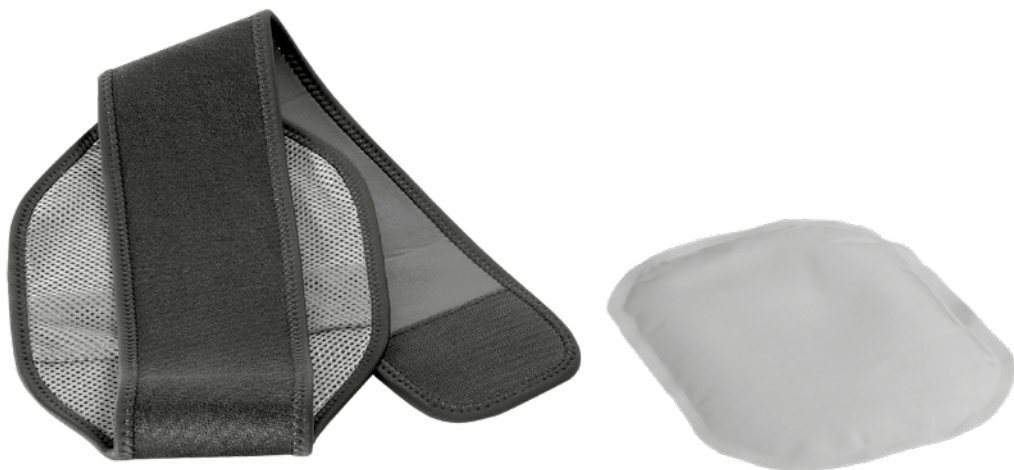

WÄRME-/KÄLTE-KOMPRESSE-SET - KNIEGELENK

(D)

WÄRME-/KÄLTE-KOMPRESSE-SET - KNIEGELENK

Gebrauchsanweisung

(PL)





ZESTAW KOMPRESÓW ROZGRZE- WAJACYCH/CHŁODZACYCH - STAW KOLANOWY

Instrukcja użytkowania



IAN 437874_2304

(D) (PL)

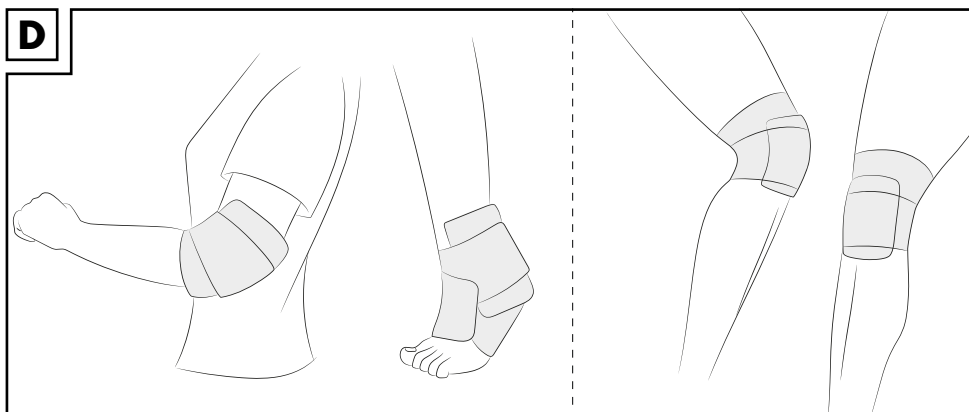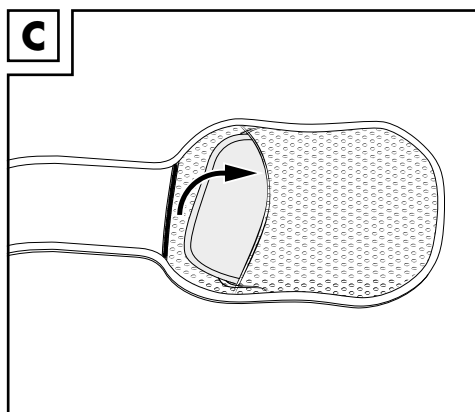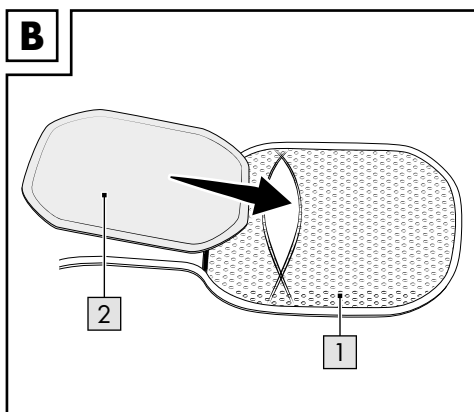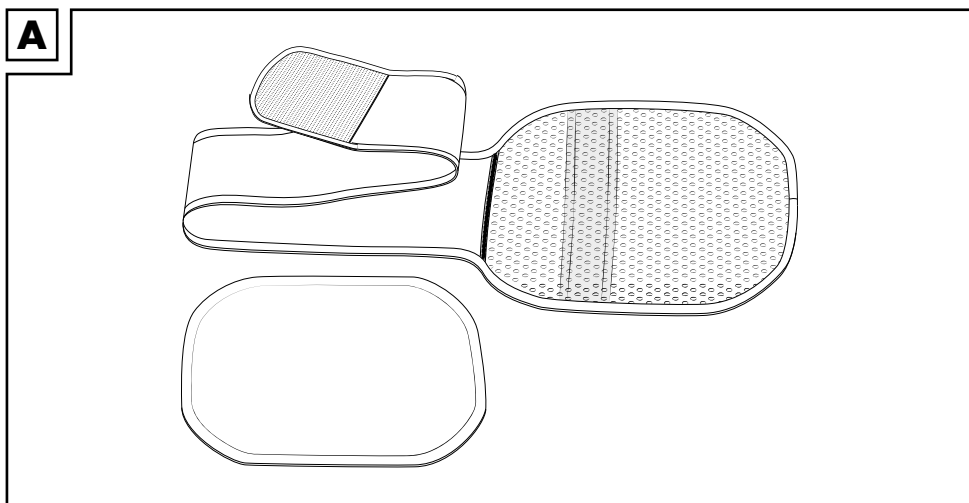

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.



Medizinprodukt der Klasse I – Dieses Produkt ist konform mit der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Bitte wenden Sie sich an unseren Service, falls Sie Fragen zum Artikel haben oder Schwierigkeiten bestehen, diese Anleitung zu lesen.

Lieferumfang (Abb. A)

1 x Befestigungsgurt (1)

1 x Warm-/Kalt-Kompresse (2)

(nachfolgend auch als „Kompressen“ bezeichnet)

1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Befestigungsgurt: ca. 79 cm (L)

Warm-/Kalt-kompresse:

ca. 18,5 x 14,5 cm (L x H)

Verwendete Symbole



Gebrauchsanweisung beachten



Herstellungsdatum (Jahr-Monat):
2023-09



Hersteller



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Trocken aufbewahren



Heiße Oberfläche



Kalte Oberfläche



Oberer Temperaturgrenzwert: 50 °C



Artikelnummer



Medizinprodukt



Warn- oder Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung unbedingt beachten



Gebrauchsanweisung als PDF auf der Kaufland-Service-Internetseite.



Dieses Produkt ist konform mit der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist nur für den privaten Gebrauch hergestellt und wiederverwendbar.

Er ist kein Sportprodukt und nicht geeignet zum Tragen während des Sports.

Indikationen Wärmeanwendung:

zur Wärmeanwendung bei Muskelschmerzen und Muskelverspannungen

Indikationen Kälteanwendung:

zur Kälteanwendung bei Quetschungen, Stauchungen und Prellungen sowie bei Entzündungen und Schwellungen

Nicht anwenden während oder bei:

- Personen, die Wärme oder Kälte nicht richtig wahrnehmen können
- arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom
- körperlicher und sportlicher Belastung

- Hauterkrankungen und offenen Verletzungen im Behandlungsgebiet
- Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten
- gleichzeitiger Einnahme schmerzstillender Mittel und Temperaturempfindlichkeitsstörungen (z. B. bei Diabetes)

Wärmeanwendung nicht bei:

- Entzündungen oder erhöhter Temperatur

Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und bewahren Sie sie unbedingt auf!



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



Verletzungsgefahr für Kinder!

- Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen. Weisen Sie Kinder insbesondere darauf hin, dass der Artikel kein Spielzeug ist.
- Beachten Sie den natürlichen Spieltrieb und die Experimentierfreudigkeit von Kindern. Verhindern Sie Situationen und Verhaltensweisen, die nicht für den Artikel vorgesehen sind.
- Der Artikel muss bei Nichtgebrauch unzugänglich für Kinder gelagert werden.



Verletzungsgefahr!

- Es dürfen keine Modifikationen am Artikel vorgenommen werden!
- Nach dem Erwärmen mit Vorsicht zu handhaben.
- Kein Spielzeug. Die Anwendung bei Kindern darf ausschließlich unter Kontrolle einer Aufsichtsperson erfolgen.
- Den Inhalt nicht verschlucken.
- Nicht überhitzen.
- Die angegebenen Erwärmungs- und Vorkühlzeiten müssen unbedingt eingehalten werden.
- Prüfen Sie den Befestigungsgurt und die Komresse vor jedem Gebrauch auf Risse und Beschädigungen.

Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden. Defekter Befestigungsgurt und Komresse dürfen nicht verwendet werden.

- Die gekühlte oder erwärmte Komresse darf nie direkt auf die Haut gelegt werden. Verwenden Sie den Befestigungsgurt mit Klettverschluss oder schlagen Sie die Komresse vor der Anwendung in ein Tuch ein.
- Treten während des Tragens Probleme auf, entfernen Sie den Befestigungsgurt sofort und konsultieren Sie bei Fortbestehen der Probleme einen Arzt.
- Achten Sie darauf, dass der Befestigungsgurt angenehm fest, aber nicht zu stramm sitzt. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Arzt!
- Legen Sie den Befestigungsgurt niemals so stramm an, dass die Durchblutung beeinträchtigt wird.
- Tragen Sie den Artikel nicht beim Schlafen oder bei längeren Ruhephasen wie z. B. langem Sitzen.
- Halten Sie sich an die angegebenen Anwendungszeiten. Tragen Sie den Befestigungsgurt nicht dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum.
- Waschen Sie die von dem Befestigungsgurt bedeckten Hautpartien gründlich und regelmäßig.
- Zur Vermeidung von allergischen Hautreaktionen muss die Haut frei von Gelen, Fetten, Salben, Ölen oder ähnlichen Stoffen sein.

Mögliche Nebenwirkungen

- Sollten beim Tragen des Befestigungsgurts Beschwerden (wie z. B. Kribbeln, Taubheit, Schmerzen, Schwellung oder Hautverfärbung) auftreten, nehmen Sie den Befestigungsgurt sofort ab!
- Gefahr von Hautreizungen und Hautirritationen! In Einzelfällen kann es zu Hautreaktionen und Reizungen kommen. Achten Sie deshalb darauf, die angegebenen maximalen Tragezeiten nicht zu überschreiten und die von dem Befestigungsgurt bedeckten Hautpartien gründlich und regelmäßig zu waschen. Sollten dennoch Probleme oder Beschwerden auftreten, konsultieren Sie sofort einen Arzt!

Wärmeanwendung

Bei der Wärmeanwendung sind Verbrennungen bei längerer Anwendungszeit bereits bei 50 °C möglich!

Nehmen Sie die Komresse aus dem Befestigungsgurt, bevor Sie sie erwärmen.

Erwärmung in der Mikrowelle:

Stellen Sie die Mikrowelle auf maximal 600 Watt. Erwärmen Sie die Komresse für 15-25 Sekunden. Prüfen Sie, ob die Komresse eine angemessene Temperatur erreicht hat. Setzen Sie ggf. die Erwärmung fort und kontrollieren Sie die Temperatur hierbei alle 10 Sekunden.

WICHTIG: Sollte Ihre Mikrowelle eine andere Leistungsstufe als 600 W haben, passen Sie die Erwärmungszeit entsprechend an.

Erwärmung im Wasserbad:

- Bringen Sie Wasser in einem Topf zum Kochen.
- Nehmen Sie den Topf von der Herdplatte und legen Sie die Warm-/Kalt-Komresse für ca. 1-3 Minuten in das Wasser.
- Prüfen Sie nach 3 Minuten und ggf. jede weitere Minute, ob eine angemessene Temperatur erreicht ist.
- Anwendungszeit: ca. 20-40 Minuten bei 40 °C.

Kälteanwendung

Legen Sie zum Kühlen die Warm-/Kalt-Komresse für die Kälteanwendung nicht ins Gefrierfach: Gefahr von Erfrierungen oder Unterkühlung!

Legen Sie die Komresse für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank bei 5 °C.

Anwendungszeit: ca. 10 Minuten.

Einlegen der Warm-/Kalt-Komresse (Abb. B-C)

- Öffnen Sie die Tasche des Befestigungsgurts und schieben Sie die erwärmte oder gekühlte Komresse hinein (Abb. B).
- Anschließend klappen Sie die Laschen der Tasche wieder zu (Abb. C).

Anlegen des Artikels (Abb. D)



ACHTUNG!

Der Befestigungsgurt soll angenehm fest, aber nicht zu stramm sitzen. Die Durchblutung des bandagierten Körperteils muss gewährleistet bleiben.

- Legen Sie die Komresse auf den gewünschten Bereich und schließen Sie den Klettverschluss des Befestigungsgurts.
- Tragen Sie den Befestigungsgurt wie abgebildet am Knie, Fuß oder Ellenbogen.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. **WICHTIG!** Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Befestigungsgurt:

- Vor dem ersten Gebrauch des Befestigungsgurts sollten Sie diesen gründlich waschen. Schließen Sie vor der Wäsche den Klettverschluss.
- Nach jeweils zwei- oder dreimaligem Verwenden empfiehlt es sich, einen weiteren Waschgang durchzuführen.
- Nach dem Waschen sollten Sie den Befestigungsgurt gründlich durchspülen.
- Separat oder mit ähnlichen Farben waschen.



Warm-/Kalt-Komresse:

Die Komresse sollte unter warmem Wasser mit einer milden Seife (keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwenden) gereinigt und mit einem weichen Tuch getrocknet werden.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerschwinglich auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 437874_2304

D Tel.: 0800 1528352 (Kostenfrei aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz)
kundenmanagement@kaufland.de



Wichtiger Hinweis

Alle mit dem Artikel in Zusammenhang aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem Anwender und/oder Patient niedergelassen sind, zu melden. Die Kontaktdaten der Firma DELTA-SPORT entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung unter „Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung“.

Gratulujemy!

Decydując się na ten produkt, otrzymują Państwo towar wysokiej jakości. Należy zapoznać się z produktem przed jego pierwszym użyciem.



Należy uważnie przeczytać następującą instrukcję użytkowania.

Produkt ten należy użytkować wyłącznie w opisany sposób oraz zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem. Niniejszą instrukcję użytkowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując produkt innej osobie, należy upewnić się, że otrzyma ona także całą dokumentację dotyczącą produktu.



Wyrób medyczny klasy I – Niniejszy artykuł jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR). W przypadku jakichkolwiek pytań lub trudności ze zrozumieniem niniejszej instrukcji prosimy o kontakt z naszym serwisem.

Zakres dostawy (rys. A)

- 1 x pasek mocujący (1)
- 1 x kompres ciepły/zimny (2)
(zwany dalej „kompresem”)
- 1 x instrukcja użytkowania

Dane techniczne

Pasek mocujący: ok. 79 cm (dł.)

Kompres ciepły/zimny:
ok. 18,5 x 14,5 cm (dł x wys.)

Zastosowane symbole



Przestrzegać instrukcji użytkowania



Data produkcji (rok-miesiąc):
2023-09



Producent



Data przydatności



Oznaczenie partii



Przechowywać na sucho



Gorąca powierzchnia



Zimna powierzchnia



Górna temperatura graniczna: 50 °C



Numer artykułu



Wyrób medyczny



Konieczne przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa zawartych w instrukcji użytkowania.



Instrukcja użytkowania w pliku PDF na stronie internetowej Kaufland-Service.



Niniejszy produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 sprawie wyrobów medycznych.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy artykuł został wyprodukowany do użytku prywatnego i może być wielokrotnie używany. Nie jest artykułem sportowym i nie nadaje się do noszenia go w trakcie uprawiania sportu.

Wskazania do stosowania okładów na ciepło:

Do robienia ciepłych okładów przy bólach i napięciach mięśniowych

Wskazania do stosowania okładów na zimno:

Do robienia zimnych okładów przy zmięgnięciach, skręceniach i stłuczeniach jak również przy stanach zapalnych i obrzękach

Nie stosować:

- u osób, które nie odczuwają prawidłowo ciepła czy zimna
- przy zaburzeniach krążenia tętniczego i zespołach Raynauda

- podczas wysiłku fizycznego i uprawiania sportu
- przy chorobach skóry i otwartych ranach w miejscu stosowania
- u osób z ograniczonymi zdolnościami umysłowymi
- przy równoczesnym przyjmowaniu środków przeciwbólowych i zaburzeniach wrażliwości na temperaturę (np. przy cukrzycy)

Okładów na ciepło nie stosować:

w przypadku stanów zapalnych i podwyższonej temperatury

Wskazówki bezpieczeństwa

Ważne: Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania i koniecznie zachować ją na później!

Niebezpieczeństwo dla życia!

- Nigdy nie pozostawiać dzieci z materiałem opakowaniowym bez nadzoru. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

Niebezpieczeństwo obrażeń u dzieci!

- Nie wolno dzieciom bawić się tym artykułem. Należy zwrócić dzieciom w szczególności uwagę na to, że artykuł nie jest zabawką.
- Należy pamiętać, że dzieci mają naturalny instynkt zabawy i chęć do eksperymentowania. Należy zapobiegać sytuacjom i zachowaniom, które nie są przewidziane dla artykułu.
- Nieużywany artykuł należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niebezpieczeństwo obrażeń!

- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji artykułu!
- Po podgrzaniu należy obchodzić się ostrożnie z artykułem.
- Artykuł nie jest zabawką. Dzieci mogą stosować wyłącznie pod kontrolą osoby nadzorującej.
- Nie połykać zawartości.
- Nie przegrzewać.
- Należy przestrzegać podanych czasów nagrzewania i schładzania.

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy pasek mocujący oraz kompres nie mają rozdarć czy uszkodzeń. Z artykułu można korzystać tylko wtedy, gdy znajduje się w nienagannym stanie. Nie wolno używać uszkodzonego paska mocującego i kompresu.
- Zimnego lub ciepłego kompresu nie wolno kłaść bezpośrednio na skórę. Użyć paska mocującego z zapięciem na rzepy lub zawinąć kompres przed użyciem w kawałek materiału.
- Jeśli podczas noszenia wystąpią problemy, należy natychmiast zdjąć pasek mocujący i skonsultować się z lekarzem, jeśli problemy będą się utrzymywać.
- Zwrócić uwagę na to, aby pasek mocujący przylegał wprowadzić mocno, lecz nie za ciasno. W razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarskiej!
- Nigdy nie zakładać paska mocującego zbyt ciasno, aby nie doszło do zaburzeń krążenia krwi.
- Nie nosić artykułu podczas snu lub podczas dłuższych okresów odpoczynku np. siedząc dłuższy czas.
- Należy przestrzegać podanych czasów stosowania. Nie nosić paska mocującego stale lub przez dłuższy okres czasu.
- Dokładnie i regularnie myć obszary skóry znajdujące się pod paskiem mocującym.
- Aby uniknąć alergicznych reakcji skórnych, skóra musi być wolna od żeli, tłuszczy, maści, olejów i innych podobnych substancji.

Możliwe skutki uboczne

- Jeśli podczas noszenia paska mocującego wystąpią dolegliwości (jak np. mrowienie, drętwienie, ból, obrzęk lub przebarwienia skóry), należy go natychmiast ściągnąć.
- Niebezpieczeństwo podrażnienia skóry! W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje skórne i podrażnienia. Z tego względu nie należy przekraczać podanego maksymalnego czasu noszenia oraz trzeba dokładnie i regularnie myć obszary skóry pod paskiem mocującym. Jeśli mimo wszystko wystąpią jakieś problemy czy dolegliwości, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem!

Ciepłe okłady

W przypadku stosowania okładów na ciepło przez dłuższy okres czasu może dojść do poparzeń już przy 50 °C!

Przed podgrzaniem kompres należy wyciągnąć z paska mocującego.

Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej:

Ustawić kuchenkę mikrofalową na maksymalnie 600 watów.

Kompres podgrzewać 15-25 sekund. Sprawdzić, czy kompres osiągnął odpowiednią temperaturę. W razie potrzeby podgrzewać dalej i sprawdzać przy tym co 10 sekund temperaturę.

WAŻNE: Jeśli moc kuchenki mikrofalowej jest inna niż 600 W, należy odpowiednio dostosować czas podgrzewania.

Podgrzewanie w kąpielni wodnej:

- Zagotować wodę w garnku.
- Zdjąć garnek z kuchenki i włożyć ciepły/zimny kompres na około 1-3 minuty do wody.
- Po 3 minutach oraz w razie potrzeby potem co minutę sprawdzić czy kompres osiągnął właściwą temperaturę.
- Czas stosowania: ok. 20-40 minut przy 40 °C.

Zimne okłady

Nie wkładać kompresu do zamrażalnika: Istnieje niebezpieczeństwo odmrożeń i hipotermii!

Kompres włożyć na przynajmniej godzinę do lodówki przy 5 °C.

Czas stosowania: ok. 10 minut.

Wkładanie kompresu (rys. B-C)

- Otworzyć kieszonkę paska mocującego i włożyć podgrzany lub schłodzony kompres (rys. B).
- Następnie zamknąć klapy kieszonki (rys. C).

Zakładanie artykułu (rys. D)

⚠ OSTRZEŻENIE!

Pasek mocujący powinien wprowadzić przylegać mocno, lecz nie za ciasno. Należy zapewnić odpowiednie krążenie krwi części ciała, na której jest okład.

- Nałożyć kompres na dany obszar i zapiąć zapięcie na rzep paska mocującego.
- Nosić pasek mocujący na kolanie, stopie czy łokciu jak pokazano na rysunkach.

Przechowywanie, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu w temperaturze pokojowej. **WAŻNE!** Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

Pasek mocujący:

- Przed pierwszym użyciem paska mocującego należy go dokładnie wyprać. Przed praniem zapiąć zapięcie na rzep.
- Po każdym dwóch lub trzech kolejnych użyciach zalecane jest ponowne pranie.
- Po praniu należy pasek mocujący dokładnie wypłukać.
- Prać oddzielnie lub z podobnymi kolorami.



Kompres ciepły/zimny:

Kompres należy czyścić ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego mydła (nie używać środków czyszczących albo dezynfekujących) i wysuszyć miękką ściereczką.

Uwagi odnośnie recyklingu



Artykuł i materiały opakowaniowe należy usunąć zgodnie z aktualnie obowiązującymi miejscowymi przepisami. Materiały opakowaniowe (np. worki foliowe) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje na temat sposobów usuwania zużytego artykułu można uzyskać u władz gminnych i miejskich. Artykuł oraz opakowanie należy usunąć w sposób przyjazny dla środowiska.



Kod recyklingu służy do oznaczenia różnych materiałów nadających się do ponownego przetworzenia (recyklingu).

Kod taki składa się z symbolu recyklingu odzwierciedlającego obieg materiałów do ponownego przetworzenia, a także z numeru, który jest oznaczeniem materiału.

Wskazówki dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej

Artykuł został wyprodukowany z najwyższą starannością i pod stałą kontrolą. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH przyznaje klientowi końcowemu na niniejszy artykuł trzy lata gwarancji od daty zakupu (okres gwarancyjny) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają normalnemu zużyciu i z tego względu należy je traktować jako części zużywalne (np. baterie) i nie obejmuje części kruchych, np. przełączników, akumulatorów ani części wykonanych ze szkła.

Wyklucza się roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku użycia artykułu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego przeznaczeniem lub w sposób wykraczający poza przewidziane przeznaczenie lub poza przewidziany zakres użytkowania lub jeśli wytyczne zawarte w instrukcji obsługi nie były przestrzegane, chyba że klient końcowy udowodni istnienie wady materiałowej lub wady wykonania, która nie wynika z podanych wyżej przyczyn.

Roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać wyłącznie w okresie gwarancyjnym za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu. Prosimy zatem zachować oryginalny dowód zakupu!

W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy skontaktować się z nami najpierw za pośrednictwem podanej poniżej infolinii serwisowej lub drogą e-mailową. W przypadku objętym gwarancją artykuł zostanie – według naszego uznania – bezpłatnie naprawiony, wymieniony lub nastąpi zwrot ceny zakupu. Z gwarancji nie wynikają żadne inne prawa.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza Państwa ustawowych praw, w szczególności roszczeń gwarancyjnych wobec danego sprzedawcy. W przypadku wymiany części lub całego artykułu okres gwarancji przedłuża się o trzy lata zgodnie z art. 581 § 1 kodeksu cywilnego. Po upływie czasu gwarancji powstałe naprawy są płatne.

IAN: 437874_2304

(PL) Tel.: 800 300062 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych)
kontakt@kaufland.pl



Ważna wskazówka

Wszystkie poważne incydenty związane z artykułem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent mieszka na stałe. Dane kontaktowe firmy DELTA SPORT można znaleźć w instrukcji użytkowania w rozdziale „Wskazówki dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej”.



DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



2023-09

LOT

02304437874

Druckversion / Wersja do druku: 2023-09

REF

Delta-Sport-Nr.: WK-13274

08.11.2023 / AM 9:49

IAN 437874_2304

10